

北条高校にはAEDを設置しています

- ① 正面玄関入口
- ② 体育館北側出入口



AEDの使い方

- ① 電源を入れる
ふたを開けると自動で電源が入る機種もあります。
- ② 2枚の電極パッドを胸部にはる
はる位置はパッドにもイラストで示されています。
- ③ AEDが心電図の解析をする
音声メッセージで指示が出ます。
- ④ 除細動（電気ショック）を行う
電気ショックが必要と判断されたら、自分と周囲の人が確実に離れていることを確認して、ショックボタンを押します。

